

# コードレス LED ライトシステム ファイアフライ 取扱説明書

この度は、ファイアフライをお買上げ頂きまして誠にありがとうございます。本品は、ペリオプティクス社によって開発された全く新しいポータブルライトシステムです。この商品を安全に正しく使用して頂くために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。



## 1. 製品特長

- 本品はコードレス LED ライトです。マグネットマウントにライトポットを取り付け、手で回転させることにより、ON⇒LOW⇒High⇒OFF の切替が可能です。
- 付属のヘッドバンド又は別売アタッチメントによって簡単に他社ルーベと組み合わせてお使い頂けます。
- ライトポットには内部にリチウムイオンバッテリーを内蔵し、充電することで約 1000 回の繰り返しの使用が可能です。(1000 回…平均的な使用目安として 3 年ほど) 焦点の合った明るい自然光はハイモード (32000 ルクス) で約 90 分。ローモード (20000 ルクス) で約 150 分の連続使用が可能です。
- ライトポットは 2 個セットされていますので、充電中にもう一つのライトポットをお使い頂ければ、交互にお使いいただけます。(充電時間…約 2 時間)

## 2. セット内容

※開封後、すべての部品がそろっているかをご確認ください。

①ACアダプター×1

②マグネットマウント×1

③ライトポット×2

④バッテリーチャージャー×1

⑤ケース×1



⑥AC切替アダプター×3

⑦コンジットフィルター×2

⑧ミニレンチ

⑨ドライバー×1

⑩ヘッドバンド×1

⑪クリーニングウエス×1

⑫保証書



## ⚠ 警告 安全にお使い頂くために必ず以下をお読みになって正しくご使用下さい。

- 本器は歯科従事者以外の方がご使用にならないように保管には充分ご注意ください。
- ライトポットを落としたり、強い衝撃を与えないでください。衝撃が原因で充電電池から液漏れが発生することがあります。その場合は直ちに使用を中止し、修理をご依頼ください。
- ライトポットの光を直接目に当てないでください。
- ライトポット及び充電器の金属部を水で拭いたり手で触れないでください。
- 分解・改造は行わないでください。
- 本製品はオートクレーブ滅菌や煮沸滅菌はできません。
- 清掃は水がかからないよう柔らかい乾いた布で拭いてください。
- アルコールなどの有機溶剤は使用しないで下さい。
- 清掃にはベンジン、シンナーなどの溶剤を使用しないでください。

## 3. ご使用方法

1. ①の AC アダプターを 100V コンセントと④の充電器に接続してください。

※付属の AC 切替アダプターをご使用頂ければ海外でもご使用頂けます。

2. バッテリーチャージャーの中央部ブルーライトが点灯し、充電準備が完了します。

3. ライトポットのレンズ面を上にして充電器にセットします。約 2 時間で充電は完了します。4 つのインジケータランプが全て点灯したら満充電です。

満充電の状態

LOW モード	20,000Lux	連続使用約 150 分
High モード	32,000Lux	連続使用約 90 分

のご使用が可能です。



## ⚠ 注意

ライトポットは約 1000 回の繰り返し充電が可能です。バッテリーは充電・放電を繰り返すことで次第に使用可能時間が短くなります。満充電後でもライトがすぐに切れる場合や満充電しても極端に使用時間が短くなった場合は、バッテリーの交換時期となります。おはやくにご購入された販売店へメンテナンスをご依頼ください。


4. 写真のように充電が完了したライトポットを付属のヘッドバンドについたルーペマウントに取付します。磁器タイプなので容易に取付が出来ます。取付した時の端子の位置で LOW⇒High⇒OFF の状態になりますので、回転させ任意の位置に合わせてご使用ください。無限切替のため、右回しでも左回しでもご使用頂けます。



マウントはお好みの位置で固定してお使いいただけますが、ジョイント部が緩くなった場合は付属のドライバーでかるく増し締めをおこなってください。



5. ライトポットの取り外しは端子部分の保護の為、上下方向に行わないでください。取り外しの際は図のように右又は左方向に取り外してください。

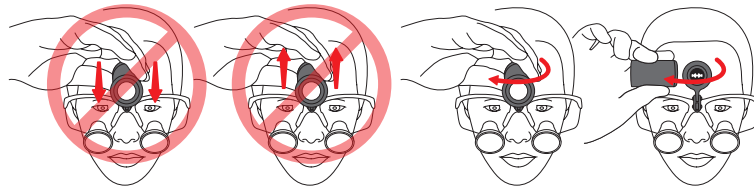

#### 4. オプション ファイヤーフライ/ソラリス/ソラリスミニ共用オプション

各社対応スライドヒンジでファイヤーフライ/ソラリス/ソラリスミニが他社ルーペに簡単にお取付頂けます。

ルーペの種類/商品コード	入数	価格
サージテル用 4375 ●型番:MT-S	1個	¥9,000/個 (税別)
キーラー用 4378 ●型番:MT-K	1個	¥9,000/個 (税別)
オプテックスプロII用 [P59] 4372 ●型番:MT-P2	1個	¥9,000/個 (税別)
パノラミックルーペ用 [P58] 4377 ●型番:MT-P3	1個	¥9,000/個 (税別)
ハイン用 7382 ●型番:MT-H	1個	¥9,000/個 (税別)
オラスコープ用 Round Flip-Up用 7388 ●型番:MT-O-N	1個	¥9,000/個 (税別)
オラスコープ用 Square Flip-Up用 7389 ●型番:MT-O	1個	¥9,000/個 (税別)
オプション	入数	価格
ライトポット 7391	1個	¥55,000/個 (税別)

ルーペの種類/商品コード	入数	価格
カールツ ツァイス EyeMag Smart用 7386	1個	¥18,000/個 (税別)
カールツ ツァイス EyeMag Pro用 (Fタイプ・Sタイプ用) 7381 ルーペの先端を利用して取付するタイプです。	1個	¥9,000/個 (税別)
TTLルーペ用 7384	1個	¥9,000/個 (税別)
Z10/Z11用 4359 [P58]	1個	¥9,000/個 (税別)

#### お手持ちの眼鏡・ゴーグルにはさむだけ!!

##### ■ユニバーサル クリップヒンジ

ワンタッチでお手持ちのメガネ・ゴーグルにはさんでご使用いただけます。



ユニバーサル クリップヒンジ 4373	1個	¥9,000/個 (税別)
------------------------	----	---------------

#### 5. 保証

- 取扱説明書通りの正常なご使用のもと製品の不具合が生じた場合、保証書による1年間の機器無償修理を致します。以下の場合には保証対象外です。  
 1- 誤用、乱用および落下等、取扱い不注意による故障・損傷 2- 不当な修理または改造による故障・損傷 3- 火災、地震、水害、その他の天災地変および落雷などによる異常電圧による故障・損傷 4- 消耗品および付属品の取り換え部品の場合 5. 保証書の提示がない場合および保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合 ※消耗品は保証対象外となります。

#### 6. その他

本品は予告なしに機器のデザイン、仕様、付属品の内容を変更することがあります。ご不明な点がございましたら弊社宛お問い合わせください。  
 輸入販売業者：株式会社 ビーエスエーサクライ 住所：名古屋市中区高島一丁目117番地 T E L: 052-805-1181  
 製造業者：PeriOptix 製造国名：アメリカ