

この製品の特徴

この製品は歯科での使用を目的としています。
ポンプでボトルに空気を供給して加圧し、自動で超音波スケーラーへ水を供給する機械です。電子制御により、給水ボトルの空気圧が低下するとポンプが作動し、水供給ボトルの空気圧が高いときはポンプは自動で停止します。
往診など据え付けのデンタルユニットがない環境での診療に大変便利です。

商品内容



本体各部の名称



取り付け方法

1. メインユニットのACアダプター差し込み口にACアダプターを差し込んでください。
2. メインユニットの空気送出口にダブルチューブの空気用チューブを差し込んでください。チューブの太い方が水用、細い方がエア用になります。



3. 給水ボトルの空気取り入れ口に空気用チューブを差し込んでください。給水ボトル上面には、空気取り入れ口にはAIR、水送出口にはH₂Oの表示があります。間違えないように接続してください。



4. ダブルチューブの水用チューブを、給水ボトルの水送出口に差し込んでください。
5. 水用チューブの他端を、スケーラーユニットの水取り入れ口に差し込んでください。最後に、ACアダプタをコンセントに差し込めば取り付けは完了です。

チューブの接続を間違えますと、水が出ません。十分注意の上接続してください。

使用方法

1. 給水ボトルに水を入れ、パワースイッチを押すと、パイロットランプが点灯し、本体のポンプが自動で作動し、スケーラーへ水を継続して供給します。ポンプは空気圧を検知しており、空気圧が十分のときは自動で停止し、低下すればまた作動します。
2. 使用しないときは、パワースイッチをオフにしてACアダプターを抜いてください。ダブルチューブと給水ボトルから水を抜いた上で、乾燥した場所で保管してください。

メンテナンスと諸注意

- 水以外の薬液等を使用した後は、必ず真水を5分以上流してスケーラーの流水経路全体を洗浄してください。残留物や溶解物の析出により、スケーラー内部ホースの固着や詰まりの原因になります。
- この製品は、本体、ACアダプター、ダブルチューブ、給水ボトル、いずれもオートクレーブができませんのでご注意ください。

1. ご使用後、電源がオフの状態でもタンク中の空気圧が高いまスクーラー本体の水供給チューブを抜くとしばらくチューブ内部の水が継続します。まず、給水ボトル上部のエアチューブを抜くか、フタを緩めてから水チューブを取り外してください。修理や予備パーツをお求めの際には、弊社までご連絡下さい。
2. 部品やパーツは必ず純正パーツをご使用ください。他社製品を使用した場合、故障や破損の恐れがあります
3. 給水ボトルとダブルチューブは水で清掃し、滅菌の際には消毒液を使用してしてください。消毒後は水で洗浄してください。
4. メインユニットの電源が入っているときはダブルチューブを抜かないでください。
5. 振動や衝撃を与えたり、落下させないでください。
6. 純正の電源アダプターを使用してください。他社製アダプターを使用すると内部回路にダメージを与える場合がございます。

トラブルシューティング

電源を入れてもパイロットランプが点灯しない、反応がない	●ACアダプタとコンセント、本体との接続が緩い場合→各プラグをしっかり差し込んでください。
スケーラーの操作をしていないのにポンプが動き続ける	●ダブルチューブの各部の接続が緩い場合→ダブルチューブの接続を確認してください。 ●ダブルチューブの接続が間違っている場合→正しくダブルチューブをつないでください。 ●ボトルから空気が漏れている→フタをしっかりとめてください。
水が供給されない	●ふたがしっかりとしまっていない ●ボトルの水が十分に残っていない。→給水ボトルに注水してください。 ●ダブルチューブに破れ、空気の漏れ、つまりがある。→ダブルチューブを交換するか清掃してください。

上記ご確認頂きましても改善されない場合には、お買い求めのディーラーまで修理をご依頼ください。

保証内容

この製品には6ヶ月間の無償修理保証がございます。ただし、下記の場合については有償修理となり保証は適用されません。

1. この取扱説明書に記載の取扱方法または禁止事項等をお守り頂けなかった場合。
2. 意図的に破損の可能性がある取り扱いをされた場合、または修理を試みるなど、分解や改造を行われた場合。

仕様/データ

主な仕様	本体サイズ 付属品 ボトル容量	100mm×70.8mm×37mm メインユニット×1 給水ボトル×1 ダブルチューブ×1 ACアダプター×1 約800ml
電源アダプター仕様	入力電流 出力 内部ヒューズ	100V-220V 50Hz/60Hz DC5V/1A T1A250V
メインユニットの性能	供給空気圧 動作音	10KPa-53KPa 80dB未満

販売者



〒468-0022 名古屋市天白区高島 1-117-1
TEL : 052-805-1181 FAX : 052-805-1182
WEB : <http://www.bsa-sakurai.co.jp>
Email : contact@bsa-sakurai.co.jp