

デンタル BSA KOTELYZER AUTO mini

取扱説明書

世界が認めた国際特許 / U.S.PAT.4552124 U.S.PAT.4500027
U.S.PAT.4133301

警告 ご使用前に必ずお読みください。

この度はBSAコテライザーオートミニをお買い求めいただき誠にありがとうございます。
本品はボタンガスを使用した熱器具です。怪我や事故を防止するため、使用方法、注意事項をよく読んで理解してから使用してください。また、この取扱説明書は必ず保存してください。


使用上の注意

- ①ガス注入は火気のある所では行わないでください。
- ②換気の悪い場所では、使用しないでください。
- ③電気コテ用の筒型コテ置台を使用しないでください。熱がこもり、ハンドルを焦し火災の原因となります。
- ④あやまって落としたり、ぶつけたりして強いショックを与えた場合は製造元サービスセンターにご相談ください。
- ⑤燃料には必ず当社の純正ガス(工業用無臭液化ボタンガス)を使用してください。
- ⑥作業の中断または、使用後は確実にガスを止めてください。
- ⑦使用中に燃料部分や高温金具等に手や身体を触れないでください。
- ⑧燃料部分に水をかけないでください。
- ⑨勝手に分解や改造をしたり、当社以外の部品を装着しないでください。
- ⑩アルコールやアルコールベースのクリーナーでガス確認窓をふかないでください。

保管上の注意

- ①40℃以上になる所や直射日光のあたる場所には置かないでください。
- ②社内の保管、特にフロントガラス等の窓のそば及びトランクルーム内の保管はおやめください。ガス圧が高くなり、火災・爆発の原因となります。
- ③幼児の手の届かない所に保管してください。
- ④チップの交換の際はチップが冷えたのを確認してから交換、収納してください。

各パーツ名称

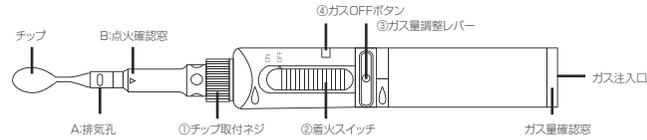

ご使用前に

A:の排気孔とB:点火確認窓が図のように上面(着火スイッチ側)に向いていることを確認してください。少ない場合は、専用のガスを図のように注入してください。ガスが注入口よりあふれてきたら満タンになります。

ガス注入方法

ハンドル底部の白色の窓に見える影を見て、液化ガスが入っていることを確認してください。少ない場合は、専用のガスを図のように注入してください。ガスが注入口よりあふれてきたら満タンになります。




使用方法

スプーンチップ使用時

1.ガス量調整レバーを図のように中央に合わせます。


注意 着火時、ガス量が多すぎたり少なすぎたりすると着火しにくくなります。

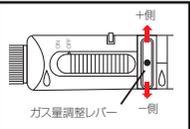

★着火のポイント

- 暑い時期はガス調整レバーを一侧(左側)
 - 寒い時期はガス調整レバーを+側(右側)
- へ少しだけ動かして調節してください。

2.②の着火スイッチを矢印方向へゆっくりと「カチッ」と音がするまで押し上げてください。

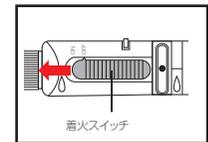

注意 速く押し上げると着火しにくくなります。

着火すると2~3秒後にBの点火確認窓が赤くなります。
※着火しない場合は④のガスOFFボタンを押し、ガスを止め、もう一度着火スイッチを押し上げてください。

警告 Aの排気孔からは熱風が出るので身体や物が触れないように十分注意してください。

3.スプーンチップ・ホットブローチップの温度は③のガス調整レバーで行います。
+側が高く、-側で低くなります。


4.消火する場合は④ガスOFFボタンを押してください。
確実に消火されているかB:点火確認窓で確認します。

- 注意**
- 着火時に②着火スイッチを押し下げないでください。故障の原因となります。
 - ③ガス調整を-側に下げてもガスは止まりません。必ず④ガスOFFボタンでガスを止めてください。

ホットブロー(熱風器)として使う場合

1.基本操作はスプーンチップ使用時と同じになります。

①チップ取付ネジを時計と反対回りに回しスプーンチップを外してください。

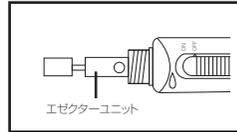

チップを外すと、セラミックが先端についたエゼクターユニットが出てきますが破損しないように気をつけてホットブローチップに付け替えてください。チップの交換の際はB:点火確認窓で着火レバー側を向くようにして①チップ取付ネジを閉めてください。

注意

- スプーンチップ・ブローチップを外した時、外したままの状態では②着火スイッチを作動(空打ち)しないでください。電圧ユニットの故障、着火不良の原因となります。


●ご使用中、ご使用後にスプーンチップにたまった溶けたワックスがA:排気孔に流れこまないよう注意してください。故障の原因となります。

こんな時どうするか?

状態	原因	処置
着火しない	ガスが入っていない又はガスの量が少ない。	ガスを注入してください。
	ガスの吹出量が多すぎる、または少なすぎる。	③ガス量調整レバーを中央の位置にしてください。
	②着火スイッチを一気に押し上げている。	ゆっくりと「カチッ」と鳴るように押し上げてください。
	A:排気孔にワックスが詰まっている。	短針等でワックスを取り除いてください。
スプーンチップ・ホットブローチップの温度が上がらない	エゼクターユニットの破損又は寿命。	エゼクターユニットは消耗品です新しいものと交換してください。
	残りのガス量が少ない	ガスを注入してください。
スプーンチップ・ホットブローチップの温度が上がらない	他のチップに交換しても温度が上がらない。	固有のチップのみ温度が上がらない場合はチップを交換してください。どのチップに交換しても温度が上がらない場合はエゼクターユニットの寿命です。新しいものと交換してください。

エゼクターユニットの交換方法

- 1.チップ取付ネジを時計と反対回りに回し、チップを取り外します。
- 2.エゼクターユニットの孔に合う棒状のものを挿し込み時計と反対回りに回すと外すことができます。

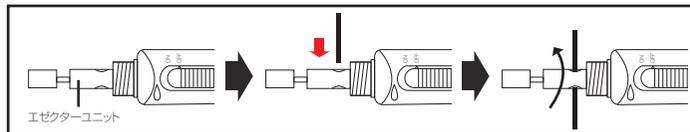


※白い部分はセラミック製です。取扱いに注意してください。

オプションパーツ

商品名	①スプーンチップ	②ホットブローチップ1.5φ	③ホットブローチップ4.7φ
商品コード	4275	4276	4274
入数	2本	2本	2本
標準価格	¥5,000 / セット(税別)	¥3,000 / セット(税別)	¥3,000 / セット(税別)

商品名	④ホットナイフ	⑤ホットカッター	エゼクターユニット
商品コード	4273	4281	4279
入数	2本	2本	2本
標準価格	¥3,000 / セット(税別)	¥2,700 / セット(税別)	¥3,600 / 本(税別)

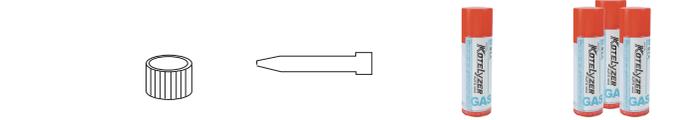

商品名	チップ取付ネジ	チップ保護カバー	BSAデンタルガス	
商品コード	4278	4282	4272	4271
入数	1個	1個	1本	3本
標準価格	¥200 / 個(税別)	¥500 / 個(税別)	¥1,200 / 本(税別)	¥3,000 / セット(税別)

保証規定

- 1.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(イ)使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障、損傷
(ロ)お買い上げ後の落下等による故障、損傷
(ハ)火災、または天災による故障、損傷
(ニ)故障の原因が本製品以外に起因する場合
(ホ)本保証書のご提示がない場合
(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を変えられた場合。
(ト)各種チップ、エゼクターユニット等の消耗品の補充
- 2.日本国内以外でご使用になった場合は、本保証から除外されます。
- 3.保障範囲は、本製品の修理、交換、または同等機能の製品と代替交換に限りです。

キリトリ線

取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間中に故障した場合無償修理致します。

B.S.A保証書				
形式	デンタルコテライザー オートミニ	保証期間	ご購入日から 3ヶ月	エゼクターユニットは除く
お買い上げ日	年 月 日	販売店		
お客様ご住所ご芳名				

【発売元】 株式会社BSAサクライ 〒468-022 愛知県名古屋市長区高島1-11-7
TEL.052-805-1181 FAX.052-805-1182

商品についてのお問合せ、修理品送付先は
【製造元】 中嶋銅工株式会社 〒355-0225 埼玉県比企郡嵐山町鎌形683
TEL.0493-62-7295 FAX.0493-62-3895