


# プレキュアーライトLED取扱説明書

この度は、プレキュアーライトLEDをお買い上げいただきありがとうございます。プレキュアーライトLEDは、歯科技工用光重合樹脂の重合のための光線照射器です。その性能を十分に引き出すために、この取扱説明書をご熟読下さいますようお願い申し上げます。今後も末長くプレキュアーライトLEDをご愛用下さい。

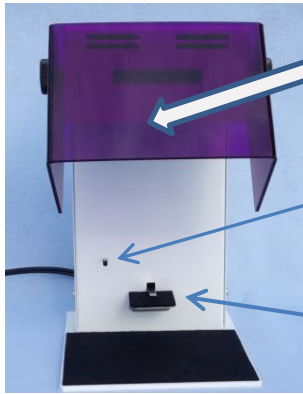

LEDランプ  
正面左側 2本 近紫外線LEDランプ 2本  
照射波長 390nm~410nm  
正面右側 4本 可視光線LEDランプ 2本  
照射波長 450nm~470nm

タイマー時間切替スイッチ  
上 15秒 中間 10秒 下 5秒 切替式

スタートスイッチ  
タイマー設定時間光照射します



横置設置  
付属のマグネットハンガーを使用しますと、  
フリーハンドで作業出来ます

## ご使用方法

- ① 電源コードを交流 100V コンセントに差し込んで下さい。
- ② タイマー時間切替スイッチで照射時間を設定して下さい。5秒、10秒、15秒のいずれかの照射時間が設定できます。
- ③ スタートボタンを押すとLEDランプが点灯します。照射中スタートボタンを押すと、照射が繰り返します。
- ④ 設定時間が終了しますと、LEDランプが消灯します。

## ご使用上のご注意

LEDランプは目に有害な光は出ていませんが、直視は絶対にしないで下さい。長時間の作業中は、目に悪影響を与える可能性があります。歯科用の光照射用保護メガネをご使用の上作業して下さい。

## 保証について

- ◎ この製品には保証書が添付されています。お買い上げの際にお受け取り下さい。
- ◎ 所定事項をご記入し保証書(控)を製造元までご送付下さい。これは、万一本機器に欠陥等が発見された場合、お客様に速やかにお知らせするため大変重要な情報です。又、保証書(控)をご送付いただけない場合、保証対象外となる場合があります。
- ◎ 保証書は記載内容をお確かめの上、大切に保存して下さい。保証書の呈示を頂けない場合、保証対象外となる場合があります。
- ◎ 保証期間はお買い上げ後1年間です。但し、ランプ及び消耗品は除きます。
- ◎ 保証修理は販売元への持ち込みを原則とします。保証期間内でも出張修理等は別途費用を頂く場合があります。

## アフターサービスについて

お買い上げの販売元又は、製造メーカー東邦歯科産業株式会社までご相談下さい。ご相談なさるときは、次のことをお知らせ下さい。

- ◎ 商品名:プレキュアーライトLED
- ◎ 故障の状態:出来るだけくわしく
- ◎ 製造番号
- ◎ 購入年月日

## 仕様

品名 プレキュアーライトLED(歯科技工用可視光線照射器)  
ランプ 近紫外線LEDランプ2本 可視光線LEDランプ4本  
消費電力 50W 入力電圧 AC100V (50/60Hz)  
付属品 マグネットクリップ  
仕様は予告なく変更することがあります。

販売者 株式会社ビーエスエーサクライ  
468-0022 名古屋市天白区高島一丁目117番地1  
TEL: 052-805-1181 FAX: 052-805-1182

お問い合わせ先 東邦歯科産業株式会社  
336-0034 さいたま市南区内谷2丁目10-2  
TEL: 048-864-2715 FAX: 048-866-6969