

BSA バイブレーター-B4 取扱説明書

この度は、バイブレーター-B4 をお買い求め頂きまして誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書を読んで正しくお使いください。

2015.02.25 改定

- 【用途】 ●石膏、埋没材の脱泡 ●鋳造用リングへの埋没材注入
●ワックスパターンへのペインティング ●床用レジン粉末と液の混和
●レジン重合用フラスコへの石膏注入
●印象材への石膏、模型用埋没材の注入

【ご使用にあたって】

- 1.) 振動は **LOW** **MID** **HIGH** の
3段階切替スイッチです。
- 2.) B4はパワーが強いため **LOW** で充分に
流し込み・脱泡が可能です。
- 3.) **MID** **HIGH** モードでお使いの場合、振動
が強いためラバーボールを作業台に強く押し付ける
と振動板と内部のトランスが干渉し、大きな音が出ます。
MID **HIGH** モードでお使いの場合、強く押しつけ
ないよう力を加減してお使いください。



警告

全てのモードにおいて連続 10 分以上の使用を禁止します。



- ・長時間の連続使用はトランスが加熱され、内部コイルが焼けてしまい故障の原因となります。
10分連続使用された後は、最低10分間は冷却してからご使用ください。
- ・焦げ臭い、煙が出るなどして作動しなくなった場合は、連続使用により過加熱でトランスが焼けています。
この場合は保証対象外となりますので予めご了承ください。

注意



- 1) 水のかからない場所でご使用ください。
- 2) 湿気・ほこり・温度の高い場所には設置しないでください。
- 3) 水平な場所でお使いください。
- 4) 歯科技工作業以外の用途には使用しないでください。
- 5) ご使用後はスイッチを切り、コンセントからプラグを抜いてください。
- 6) ご自身での修理・改造はおやめください。
- 7) 修理は、購入店または弊社あてにご依頼ください。

キリトリ線

B.S.A 保証書

形式	バイブレーター-B4	保証期間	ご購入日から 6ヶ月	印
お買い上げ日	年 月 日			
お客様 ご住所 ご芳名	〒 ☎	販売店		
商品についてのお問い合わせ				
取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間中に故障した場合無償修理致します。				
株式会社ビー エス エー サクライ TEL (052) 805-1181 FAX (052) 805-1182				
〒468-0022 名古屋市長天白区高島一丁目117番地1 http://www.bsa-sakurai.co.jp E-mail:contact@bsa-sakurai.co.jp				