


歯科技工用電気レーズ

コントロール1・2 取扱説明書

この度は、BSA 技工用レーズ コントロール1・2 お買い求め頂きまして誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書を読んで正しくお使いください。



コントロール1 仕様		1年保証
本体寸法	H250×W315×D310mm	
重量	9kg	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	最大消費電力196W	
回転数	無段階コントローラー 0～3500rpm	

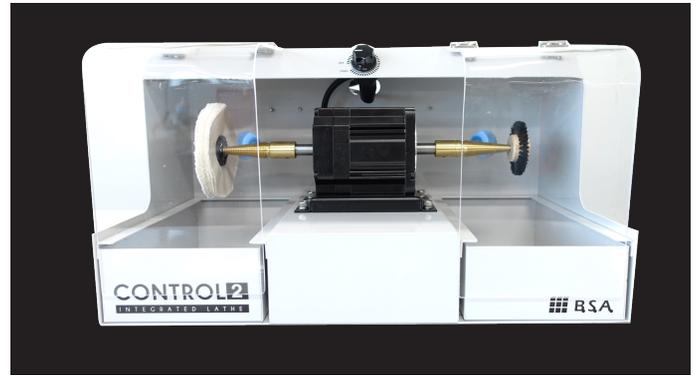

コントロール2 仕様		1年保証
本体寸法	H250×W460×D310mm	
重量	15kg	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	最大消費電力196W	
回転数	無段階コントローラー 0～3500rpm	

■設置方法

- ・直射日光等のあたる高温になる場所、湿気が多い場所、水のかかる恐れのある場所には設置しないでください。
- ・安定した場所に設置し、付属の金具、ビスで本体を固定してください。（取付場所は本体両サイドにあります。）
- ・ジェットクリーナー等の集じん装置を設置する場合は背面にあるゴムキャップを外し、集じん装置のホースを接続してください。

■ご使用方法

- ①タケノコに研磨用ブラシ、パフ等をしっかりと取付した後、コントロールスイッチが OFF になっていることを確認の上、電源コードをコンセントに接続してください。
- ②研磨を行う際には、粉塵による人体への影響を避ける為、保護メガネ、局所吸塵装置、防塵マスクをしてご使用ください。研磨は極度に力を入れず、軽いタッチで断続的に押し付けて作業をしてください。
- ③最高回転数で 30 分以上の連続使用はお控えください。
- ④使用後はモーターに付いた粉塵をこまめに清掃してください。
- ⑤アクリル製レーズカバーは消耗品です。（保証対象外）シールドに傷、くもり、割れが生じた場合は交換してください。
- ⑥アクリル製レーズカバーの取付ネジが緩んできた場合は+ドライバーで増し締めしてお使いください。

■オプションパーツ

アクリル製レーズカバー 1 枚 3,000 円

タケノコ 1 本 3,000 円

■保証

●取扱説明書通りの正常なご使用のもと製品の不具合が生じた場合、保証書による1年間の機器無償修理を致します。以下の場合は保証対象外です。
1- 誤用、乱用および落下等、取扱い不注意による故障・損傷 2- 不当な修理または改造による故障・損傷 3- 火災、地震、水害、その他の天災
地変および落雷などによる異常電圧による故障・損傷 4- 消耗品および付属品の取り換え部品の場合 5. 保証書の提示がない場合および保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合 ※消耗品は保証対象外となります。

■その他

本品は予告なしに機器のデザイン、仕様、付属品の内容を変更することがあります。ご不明な点がございましたら弊社宛お問合せください。
製造販売：株式会社 ビーエスエーサクライ 住所：名古屋市天白区高島一丁目117番地 T E L：052-805-1181
製造国名：大韓民国