

# マイクロトーチ MT-2 取扱説明書

この度は、マイクロトーチ MT-2 をお買い求め頂きまして誠にありがとうございました。  
ご使用前に、この取扱説明書を読んで正しくお使いください。


## 【ご使用前に】

- ・本品は歯科技工用トーチです。用途以外でのご使用はしないで下さい。また、歯科従事者以外は操作しないで下さい。
- ・夏の車内、ファンヒーター吹き出し口など50℃以上の高温になる場所には置いたり使用しないで下さい。
- ・落としたり、強い衝撃を与えた場合やいつもと使用感が違うなどの異常が感じられた場合は、使用しないで下さい。
- ・ピュアブタンガス専用トーチです。家庭用ポータブルコンロ用ガスはご使用にならないで下さい。故障の原因となります。BSA デンタルガス等、高純度のブタンガスをご使用ください。
- ・溶けたワックス、モデリングコンパウンド、ストップング等をノズル先端部分に落とさないようご注意ください。  
※この場合の故障につきましては3ヶ月保証対象外となります。ご注意ください。
- ・使用後は小児の手の届かない場所で保管下さい。

## 1. ガスの充填について

トーチから炎が出ている状態でのガス充填は爆発・火災を引き起こす原因となり大変危険です。又、近くで火気を使用している場合の充填も引火の可能性があり危険ですので行わないで下さい。

**⚠ 警告** 近くに火元が無い事を確認し、必ずトーチを完全に消火した状態でガス充填を行って下さい。

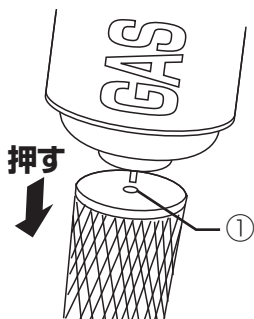


1. トーチ側面部を上にし、純正ブタンガスボンベノズルをガス注入口に直角に突き刺し、ゆっくりと下に押し下げます。
2. ①ガス注入口より、ガスがあふれ出てきたら満タンですので、ガスボンベを引き抜いて下さい。


**⚠ 注意** 充填後2～3分待つてガスが安定した後にご使用ください。注入直後に点火すると着火しにくい又は炎が安定しない場合があります。

**MEMO** 注入後、①ガス注入口よりガスがもれている場合、直ちにガスボンベのノズルを再びガス注入口に差し込み、ノズルを強く押さずにゆっくりとわずかに上下にこきざみに動かして下さい。ガス注入口からのガスもれはこれで止まります。

## 2. 着火方法

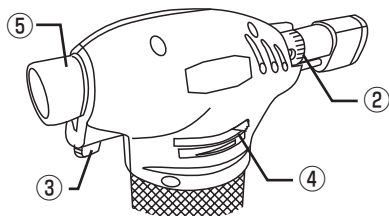


【背面】

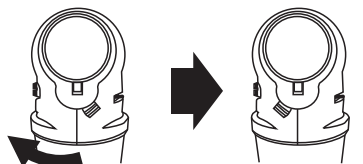

チャイルドロックを右→左へスライドさせます。着火可能状態

1. ②エアーコントロールバルブを回してエアー取入口を全開にします。

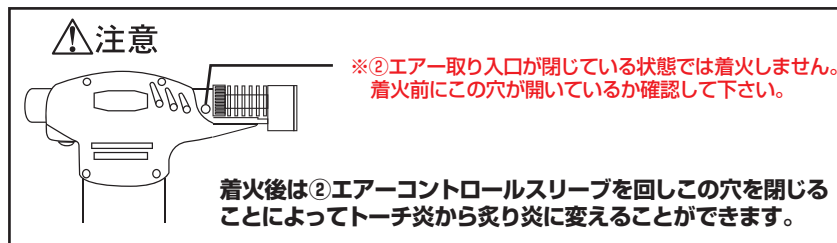


2. ③赤いチャイルドロックを左側に回し着火可能な状態にします。チャイルドロックが右側にある状態では着火ボタンが押せません。

3. ④ガス調整レバーを一と+の中間位置にして下さい。




炎小さく - 炎大きく +

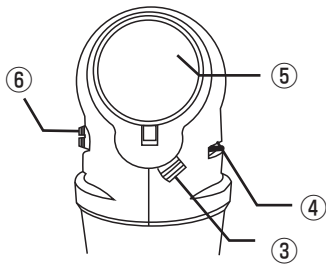

4. ゆっくりと⑤着火ボタンを押しますと着火します。ボタンから手を放しますと火は消えます。炎を連続して出し続けたい場合はボタンを押した状態で⑥ロックレバーを右側へスライドして下さい。着火ボタンを押すたび、チャイルドロックが自動でかかります。着火しなかった場合は都度③チャイルドロックを着火可能な状態にして下さい。

### 3. 消火方法

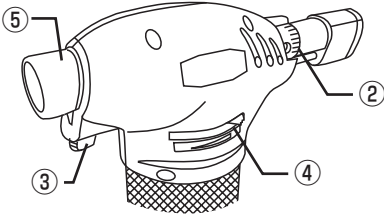

1. 通常時の消火方法は⑤着火ボタンから手を放しますと火は消えます。 炎を連続して出し続けたい場合の消火方法は、⑥ロックレバーを左側にスライドさせて下さい。これでガスが止まり炎が消えます。



### 保証規定

- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (イ) ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障、または損傷。
  - (ロ) お使い上げ後の落下等による故障、または損傷。
  - (ハ) 火災、または天災による故障、または損傷。
  - (ニ) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
  - (ホ) 本保証書のご提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名販売店名の記入がない場合、あるいは字句を変えられた場合。
- 日本国内以外でご使用になった場合は、本保証から除外されます。
- 保証の範囲は、交換、または同等機能の製品との代替交換に限ります。

## B.S.A マイクロトーチ MT-2 保証書

形式	MT-2	保証期間	ご購入日から <b>6ヶ月</b>
お買い上げ日	お客様 ご住所 ご芳名	〒	☎
印	販売店		

### 商品についてのお問い合わせ

取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間中に故障した場合無償交換致します。  
保証期間が過ぎての故障したものにつきましては、新品交換ができません。修理の場合、基本技術料3,000円+部品代(1,000~2,000円)と製品より高額となります為、新品のご購入をお勧め致します。

株式会社ビー エス エー サクライ


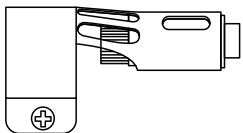

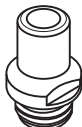

TEL (052) 805-1181 FAX (052) 805-1182

〒468-0014 名古屋市天白区中平四丁目115番地

<http://www.bsa-sakurai.co.jp> E-mail: [contact@bsa-sakurai.co.jp](mailto:contact@bsa-sakurai.co.jp)



### 別売りオプションパーツ

BSA デンタルガス	マルチコネクター	ハンダゴテチップ	ホットブローチップ	ホットナイフチップ
 <p>容量: 480cc</p>	 <p>MT-2本体に取付けて使用します。 先端に右のハンダゴテ・ホットブロー ・ホットナイフチップの3種類が付け られます。</p>			
医院価格1本 <b>1,200円</b> 3本セット <b>3,000円</b>	医院価格1ヶ <b>1,200円</b>	医院価格1ヶ <b>550円</b>	医院価格1ヶ <b>200円</b>	医院価格1ヶ <b>450円</b>