

# ワックスポット A-120 取扱説明書

この度は、ワックスポット A-120 をお買い求め頂きまして誠にありがとうございました。  
ご使用前に、この取扱説明書を読んで正しくお使いください。

## 【ご使用前に】

- ・ご使用中は本体が大変熱くなります。本体に直接触れますとヤケドの恐れがあります。本体には絶対に触れないでください。燃えやすいものの近くや水のかかる恐れのある場所では、絶対にご使用しないで下さい。
- ・歯科従事者以外はご使用にならないで下さい。又、歯科用ワックス溶融以外の用途では使用しないでください。
- ・ご使用後は必ずプラグを電源コンセントから抜いて保管下さい。(本品はAC100V 日本国内専用です)
- ・**ボリュームをHIGHのままでの長時間の連続使用はお控え下さい。本体内部温度の過上昇により故障の原因となります。**

## ■ご使用方法

- 1.電源プラグを100Vのコンセントにしっかり差し込み、電源コードにあるパワースイッチをONにしてください。
- 2.本体にあるボリュームを時計回りに回すと左側にあるLEDランプが点灯します。(ランプが点灯中はヒーター加熱中を表します)ご使用になるワックスの溶融点に合わせてダイヤルを調整してください。

**ご注意：** 左側のLEDランプが消えている時はボリュームの位置で温度が安定しています。  
ポットの温度が下がるとサーモスタットが入り再び加熱を開始します。

※ワックスポットから異音・煙など通常と違う状態を感じた場合は直ちにご使用をやめ、販売店にご連絡ください。

キリトリ線

## B.S.A保証書

形式	ワックスポット A-120	保証期間	ご購入日から 6か月	印
お買い上げ日 年 月 日				
お客様 ご住所 ご芳名	〒  ☎	販売店		
商品についてのお問い合わせ				
取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間中に故障した場合無償修理致します。 株式会社ビー エス エー サクライ TEL (052)805-1181 FAX (052)805-1182 〒468-0014 名古屋市天白区中平四丁目115番地 <a href="http://www.bsa-sakurai.co.jp">http://www.bsa-sakurai.co.jp</a> E-mail:contact@bsa-sakurai.co.jp				