

取扱説明書

BSA バイブレーター 【GIGA】

- 【特徴】
- 1) 大型で堅牢なつくりです。
 - 2) 振動は無段階でお好みの振動でご使用いただけます。
 - 3) 振動板は強固な構造で高耐久性。
 - 4) 振動切り替えスイッチによる2パターンの振動幅をご使用いただけます。

【ご使用上のご注意】

- 1) 15分以上継続してのご使用はお避けください。
- 2) 水のかからない場所でご使用ください。
- 3) 湿気・ほこり・温度の高い場所には設置しないで下さい。
- 4) 水平な場所でお使い下さい。
- 5) 歯科技工作業以外の用途には使用しないで下さい。
- 6) ご使用後はスイッチを切り、コンセントからプラグを抜いて下さい。
- 7) 故障時には修理は、購入店又は弊社宛にご依頼ください。

(ご自信での修理での修理や改造はおやめください)

- 【用途】
- 1) 石膏、埋没材の脱泡
 - 2) 印象への石膏、模型用埋没材の注入
 - 3) ワックスパターンへのペインティング
 - 4) 鋳造用リングへの埋没材注入
 - 5) レジン重合用フラスコへの石膏注入
 - 6) 床用レジン粉末と液との混和

BSA バイブレーター 【GIGA】 保証書

【保証期間 6ヶ月】

お買い上げ日	年	月	日
	〒	TEL	
お客様御住所			
ご芳名			
ご購入店			

取扱説明書に従った正常使用状態で保証中に故障した場合無償修理いたします。

発売元 ㈱ ビーエスエーサクライ
住所 名古屋市天白区中平4-115
TEL 052-805-1181