
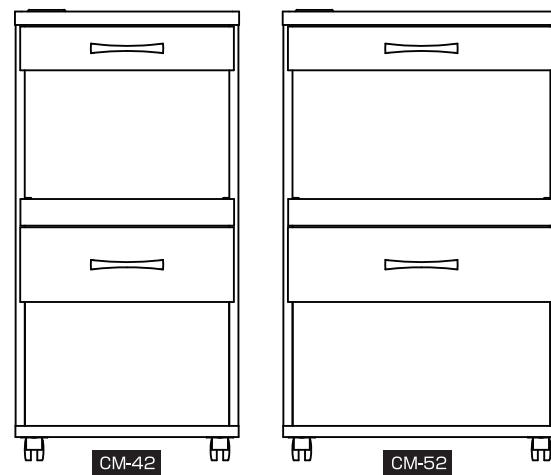


# メディカート シリーズ

●製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。取扱い説明書をよくお読み頂き、正しく安全にお使いください。

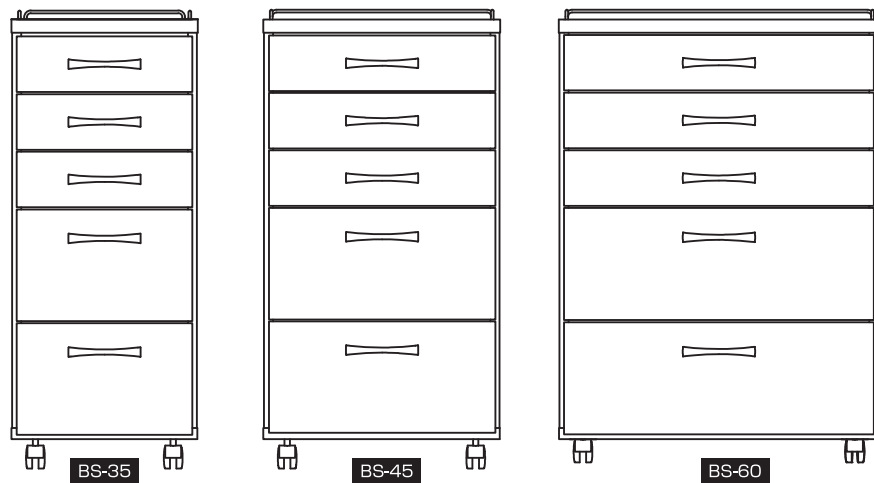

Product	BS35	BS45	BS60
Product Size	W35 x D42 x H83.6cm	W44.5 x D42 x H83.6cm	W60 x D42 x H83.6cm
Weight	24.2kg	27.5kg	32.8kg
Small drawer	W26.3 x D35.9 x H6.1cm	W35.8 x D35.9 x H6.1cm	W51.3 x D35.9 x H6.1cm
Large drawer	W26.3 x D35.9 x H12cm	W35.8 x D35.9 x H12cm	W51.3 x D35.9 x H12cm

Product	CM42	CM52
Product Size	W42 x D44.5 x H83.6cm	W52 x D44.5 x H83.6cm
Weight	26.4kg	30.8kg
Small drawer	W43.3 x D32.3 x H4.5cm	W33.3 x D32.3 x H4.5cm
Large drawer	W43.3 x D23.3 x H8.8cm	W43.3 x D32.3 x H8.8cm

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)


本説明書に記載した注意事項は、安全に関する重大な内容です。注意事項を無視した取扱いをした場合、物的損害、変色が発生する可能性があります。

組立	●組み立てる前に「部品・付属部品の確認で部品数を確認してください。●必要な工具を用意してください。●段ボール等を下に敷いてから組み立ててください。●安定した平らな広い場所で行い、工具類の取扱いに十分注意し、2人以上で行ってください。●必ず組立手順通りに組立してください。●キャスター、ネジなど確実に取り付けてください。●完成後、ネジで確実に締めつけているか再度確認してください。●改造しないでください。
設置	●開梱・設置は二人以上で行ってください。●設置する場合は収納物を全て取り除いてください。●取っ手をつかんで持ち上げたり移動したりしないでください。●設置・移動する際は、ストッパー付キャスターのロックを掛けた状態で製品を引きずらないでください。●製品が不安定ですと、引出しの出し入れがスムーズにならない場合があります。水平を保つように設置してください。●高湿・多湿の部屋の場合、カビやダニが発生しやすくなります。空気が流れるよう壁から少し離して設置し部屋の換気をしてください。●直射日光や熱・暖房器の風が直接当たらない場所に設置してください。
使用	●天板、引出しに集中的に荷重をかけないでください。●天板の上に直接熱いものを置かないでください。●濡れたものを直接置かないでください。水等で濡れたら乾いた布で軽く拭き取ってください。●引出しの上段だけに収納しないでください。●引出しの上に乗る、無理な力で引張ったりしないでください。●引出しを同時に引き出さないでください。引出しを使用する際、手や指を挟まないように注意してください。●必ずストッパー付キャスターのロックを解除してから動かしてください。●移動する際は、落としたり倒したりしないように手でしっかりと持って運んでください。●木材の接着剤等（ホルムアルデヒド）が残っている場合があります。肌の弱い人はアレルギー症状を起こす事がありますので十分に換気して（ホルムアルデヒド）を取り除いてください。●耐荷重を超える物は収納しないでください。※天板30kg 引出し各5kg●製品に乗ったり、激しく動かしたり、腰掛けたりしないでください。
保守	●ご使用後は、柔らかい布で乾拭きしてください。●本体表面を水気が多い雑巾で拭かないでください。●汚れがひどい場合は、洗剤を薄めやわらかい布に含ませ、固く絞り汚れを拭き取ってくださいその後、洗剤が残らないように乾いた布で十分に拭き取ってください。●シンナー類・ベンジン・アルコール類・クレンザー・金属たわし・化学ぞうきんは使用しないでください。●キャスター部分にたまったホコリは定期的に取り除いてください。


## BSシリーズ

※組立にはドライバーが必要です。


### 部品・付属部品の確認

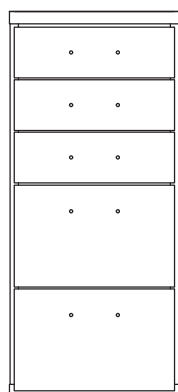


BS-35

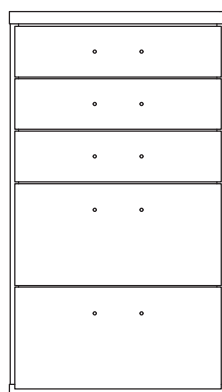

BS-45


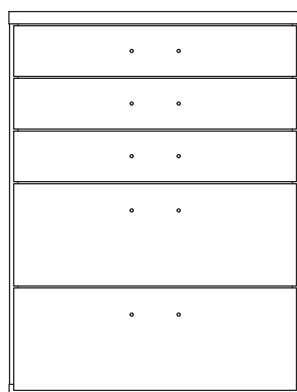


BS-60

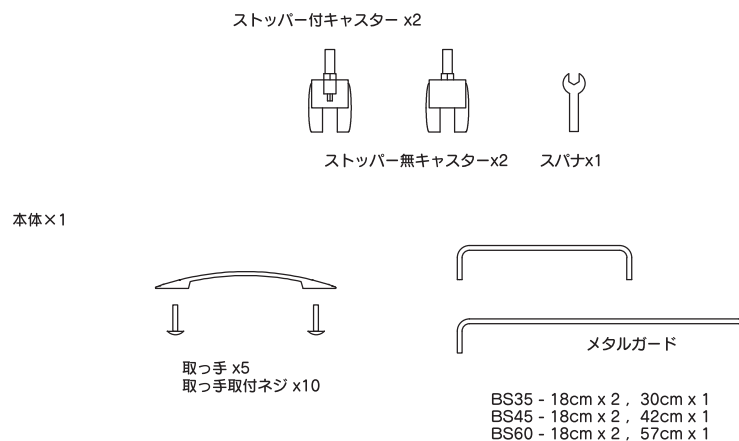


## 組立


1. 本体を逆さまにしてキャスターを取り付けます。

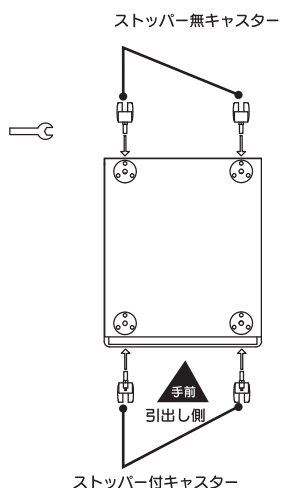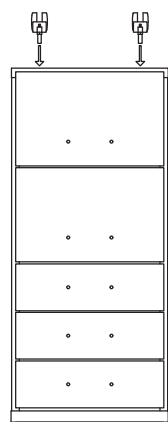

2. 本体を元に戻し、引出しに取っ手を取り付けます。


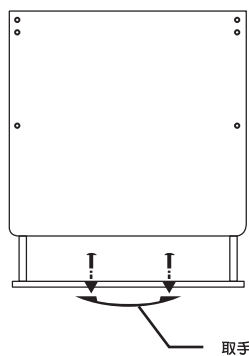


3. 必要に応じ、メタルガード、ステンレス天板 (OP) を取り付けます。

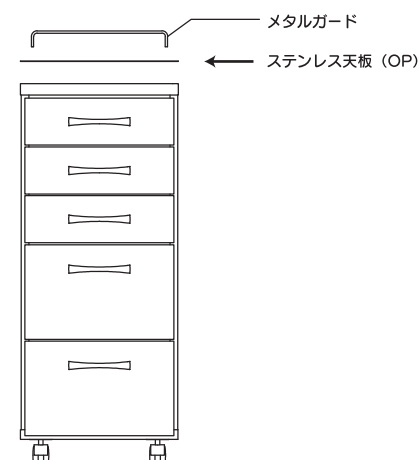


## CMシリーズ

### 部品・付属部品の確認

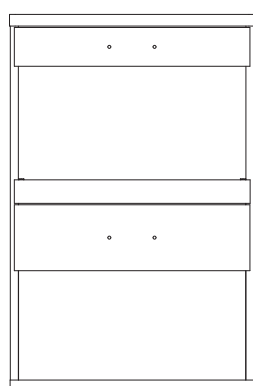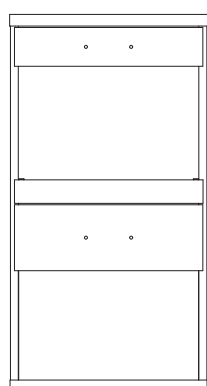

本体×1

ストッパー付キャスター×2

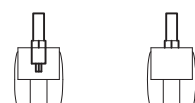

ストッパー無キャスター×2



スパナ×1





めくらキャップ×1




取っ手×5  
取っ手取付ネジ×10

## 組立


1. 本体を逆さまにしてキャスターを取り付けます。

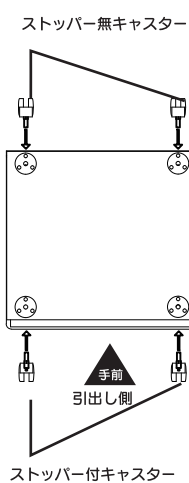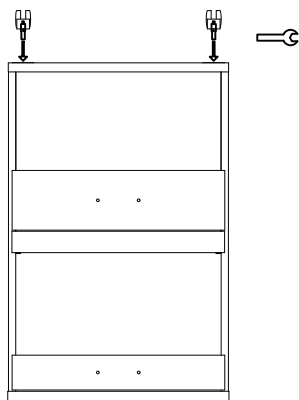


2. 本体を元に戻し、引出しに取っ手を取り付けます。

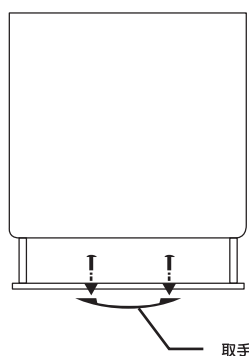






3. 必要に応じ、めくらキャップを取り外し配線を通します。ステンレス天板 (OP) を取り付けます。

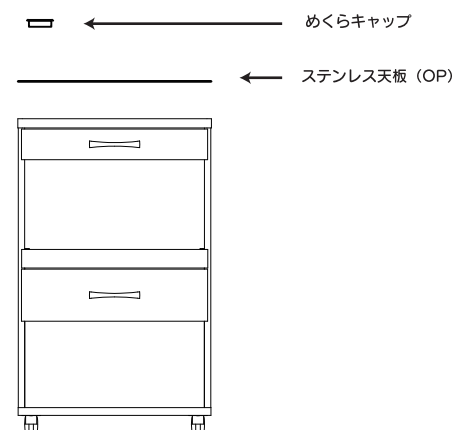

1. 上段の引出しは、裏返すことによりテーブルとしてご使用頂けます。

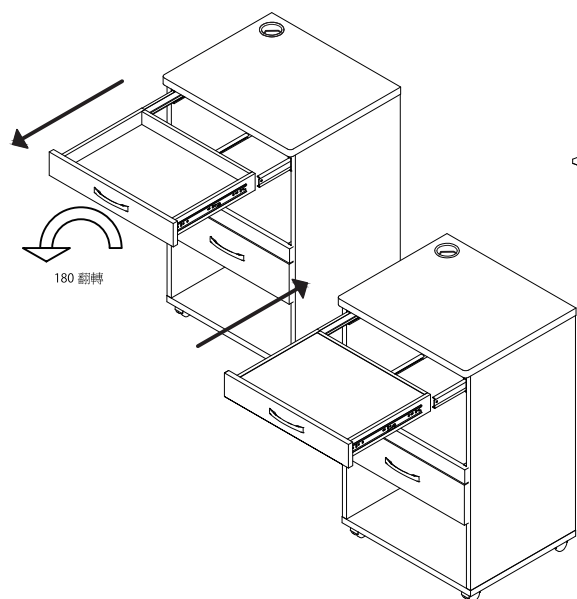

2. テーブルとしてご使用頂く場合は、ライドテーブルを引出し、  
①側面にある黒いレバーを下にさげながら引出しを引き抜いた後、  
引出しを180°回転させ再度取付するとテーブルとしてご使用頂けます。

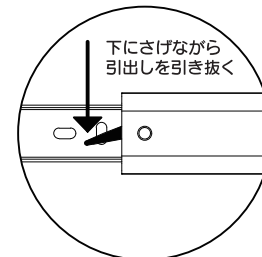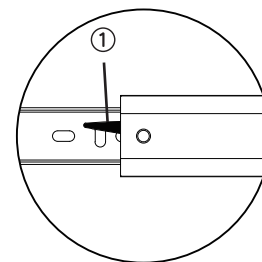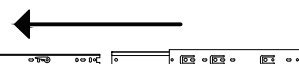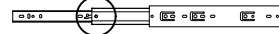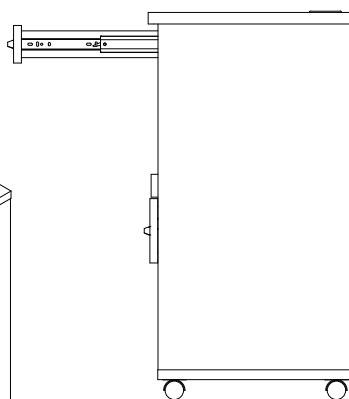

[発売元] ■■■ BSA株式会社ビーエスエーサクライ

〒468-0022名古屋市中天白区高島一丁目117番地1 TEL.052-805-1181 FAX.052-805-1182