

# エコピンシステム **ECO PIN SYSTEM** 新発売



**圧倒的な低コスト&約30分で正確な模型が完成!!**



エコピンシステム **ECO PIN SYSTEM** とは・・・

- ダウエルピンの植立の手間がなくワンステップでピン模型が完成できます。
- ダウエルピンは必要な部分に差し込むだけ。無駄がありません。
- ピンモールド・ベースモールドのプラスチックベース部分は2〜3回繰り返し使用ができ経済的。
- エコピンコネクターを使用すれば、上下顎の連結はワンタッチ!保管にも便利です。

※アットワンスを使用した場合



**片顎の場合**

スクエアピン + エコピンモールド片顎右用・左用

+

=

**77円**

標準価格

の経済性

※お手持ちの両加大吻合器を使用し、スクエアピン1本を使用した場合

**全顎の場合**

スクエアピン + エコピンモールド全顎用

+

=

**97円**

標準価格

の経済性

## エコピンシステム **ECO PIN SYSTEM** 基本のご使用方法



- 1 石こうモデルを高さ10〜20mm程度までトリミングします。
- 2 トリミング後の模型
- 3 ピンの位置をマーキングし、エコピンモールドにスクエアピンを植立します。
- 4 ワセリン等の分離材を塗布後、石こうを盛ります。
- 5 マーキング位置を合わせて石こう模型を圧接します。
- 6 底部からピンを押しして分離します。
- 7 ノコ又はダイヤモンドディスクで分割します。
- 8 エコピンモールドに戻します。

**咬合器に装着して完成!!**

9

ベースモールド

エコピンコネクター

エコピンモールド全顎

スクエアピン

9

ベースモールドとエコピンコネクターをお使い頂ければ、「石こうフリー」でより早く!! 送りにも、保管にも便利です。

Or