



BSAが10年ぶりに今考えられる最高品質のマスクを作りました!!

CLINEEL 新発売

クリニール

クリニックで働くすべてのドクター・スタッフの方々の安全性、
快適性を第一に考え開発されました。

クリニールは3層構造で高品質

クリニールはプレフィルター:28g + 高密度スパボンフィルター:20g
+ インナーフィルター:25gの3層構造。
肌ざわりが良く、**BFE(細菌ろ過効率) 99.6%以上**の安心性能。
それでいて息苦しさもなく快適です。

ピッタリフィットで快適な使用感

アルミ製ノーズピース採用でお顔にピッタリフィット。さらに、アゴの部分にもアルミロン
グピースを採用したことにより、小さなお顔のスタッフでもマスクとお顔の間にできる隙
間が最小限に抑えられます。そのため細菌以外にも、花粉などの微粒子も入りにくい構造
のプレミアムマスクです。

ラテックスフリー・ワイドイヤーループ

6mm巾の超ワイドなソフト平ゴムを採用。食いこまないで頬に優しく、長時間のご使用でも
快適です。ゴムにラテックス成分は含まれていないので安心です。

- Mサイズだけで顔の大きな方にも小さなお顔の方もピッタリフィット!
- ワンサイズですむので在庫管理もラクラク!

CLINEEL は3色そろって新発売

【クリニール装着手順】

- ①クリニールノ刻印が顔の外側に来るようにします。
- ②ノーズピースを鼻の両側で押えて鼻のカーブに
合わせて押し付けます。



- ③顔を包み込むようにアゴまでマスクを下に広げます。
- ④アゴの部分のアルミロングピースをつまみ横に折り
曲げ顔に隙間が無いように調整します。



サイズ:[M] 175×90mm 1カートン40箱入
1箱50枚入
標準価格 **¥1,000** /箱 (税別)



ぶかぶかのマスクでは隙間
が大きく開いています。



1ステップ
きゅつ
とつまんで

顎のワイヤーをつまみます。



2ステップ
折り
曲げる

横に折り曲げます。



小さなお顔でも隙間が開かず
ピッタリフィット!感染防止に有効です。

HEPA-R3 MEDICAL MASK

ヘパール スリー

おかげさまでヘパール3マスクはご好評頂き20年。
良いものは変わりません、今年、新色・新柄が追加になりました。

HEPA-R3ラインアップ



ピンク サイズ:S/MS/M イエロー サイズ:M グリーン サイズ:M ホワイト サイズ:S/MS/M ブルー サイズ:M タイ・オン(ヒモ) ブルー サイズ:M

お顔の小さい方に。



145×90mm

Mだと大きいSだと小さいと言う方はコチラ!



155×90mm

標準サイズ



175×90mm



175×90mm

ブラック

理容・美容業界で大人気。
プライベートでもご使用ください
サイズ:S/M



ピクチャーパターン

サイズ:S/M



1箱50枚入

標準価格 **¥1,000** /箱 (税別)

1カートン20箱入
タイオンタイプ
1カートン10箱入

BSAマスクはちょっと上質。長年お使い頂けるにはワケがあります。サンプルでお確かめください。