

EP LIGHT 取り扱い説明書


このたびは「EP LIGHT」をご購入いただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に本書をよくお読み頂き、正しくお使い下さいますようお願い申し上げます。


ご使用例



根管口部の確認

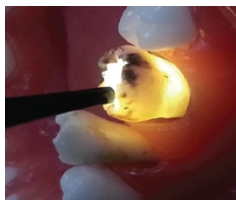


う蝕確認

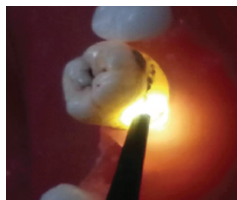

歯石確認




クラック確認

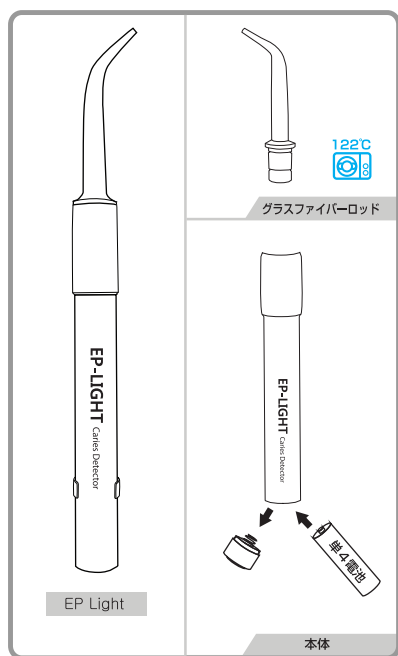

ご使用方法

1. グラスファイバーロッドを回しながらゆっくりと本体に差し込みます。本体とグラスファイバーロッドに隙間が空かないように図のように回転させながら奥までしっかりと差し込んでください。

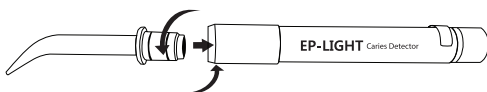

※入りにくい場合はリングをしめらせてください。

2. 単4電池を入れ、フタをしっかりと閉めます。本体下部にあるボタンを押してライトのON/OFFを行います。

3. 口腔内を観察してください。

※ファイバーロッドを外した状態で通常のペンライトとしてもご使用いただけます。

ご注意

1. 本体は水のかからないようにしてください。又、湿気の多いとこでの保管は避けてください。
2. 本体はオートクレーブ滅菌はできません。清掃する場合はアルコールを含まない除菌剤・除菌シートをご使用ください。(花王：セーフキープ)
3. グラスファイバーロッドはオートクレーブ滅菌(122℃)が可能です。