

ジェットクリーナーII・III 取扱説明書

※ジェットクリーナーⅡはジャバラホースタイプ、Ⅲはアームタイプです。

この度はジェットクリーナーⅡ・Ⅲをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよく
お読みになり、保管してください。



4.機器の使用・使用後は次の事項に注意してください。

- ①機器全体に異常の無いことを絶えず監視してください。(異臭・異音)
- ②機器に異常が発見された場合には速やかに機器の動作を止めてご購入店へ修理をご依頼ください。
- ③機器に患者が触れる事が無いようにしてください。

5.機器は改造しないでください。

6.保守点検について

- ①本体の清掃方法は中性洗剤をしみ込ませた布、又は花王「セーフキープ」で拭いてください。
- ②しばらく使用していない状態の機器を使用する場合は、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動する事を確認してください。
- ③使用中に異常が感じられた場合は電源スイッチを「OFF」にして、コンセントを抜き、購入先または当社に連絡してください。
- ④紙パックの交換 紙パック下のフィルターは清掃をこまめに行ってください。吸引の悪い状態が続けず、モーターに悪影響を及ぼしますので吸引力が落ちたと感じた場合またはモーター吸引音が変化したと感じた場合は速やかに紙パック交換とフィルターの清掃を行ってください。同時に紙パックフィルターが目詰まりした状態でご使用されるとモーターに悪影響を与えますので充分にご注意ください。
- ⑤紙パックフィルター下のスポンジフィルターは週に1回は清掃してください。(水洗い頂き充分に乾燥させてください。)

3.輸送及び保管に関する環境条件について

- ①振動、衝撃などの無いように輸送及び保管を行ってください。
- ②水がかからないように輸送及び保管を行ってください。
- ③気圧、風通し、日光、埃、塩分・硫黄分を含んだ空気などによる悪影響のない環境下で輸送及び保管を行ってください。
- ④化学製品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないでください。
- ⑤●温度範囲：-10°～35℃ ●相対湿度20～90%（非結露） ●気圧70～106KPaの範囲内で輸送及び保管をしてください。

4.仕様

環境温度	-10℃～35℃	電 源	AC100V 50/60Hz
相对湿度	20～90%	消費電力	900W
気 圧	70KPa～106KPa	重 量	9kg
		最大風量	1.9m³/分
		真空度	10kpa

1.注意事項

	注	意
	●本製品は技工用集塵機です。目的以外には使用しないでください。 ●幼児や子供を機器に触れさせないでください。 ●発火性のある金属の吸引には使用しないでください。 ●有機溶剤、火気類、水等を絶対に吸引させないでください。 ●加熱する恐れがある光等、熱源にさらしての使用、放置はさけてください。 ●吸引口付近に物を置かないでください。 ●本製品に必要以上の荷重をかけないでください。 ●移動時はハンドルを両手で持ち、転倒に充分注意してください。	

以下の原因により生じた故障・損傷につきましては、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

- ①当社または当社の指定した業者以外による改造・保守及び修理
- ②当社が納入した製品以外の他社製品が原因で当社の製品が受けた故障・損傷
- ③当社指定の純正部品以外の補修部品の使用による改造・保守・修理
- ④この取扱説明書に記載されている注意事項や操作手法を守らなかった場合
- ⑤この取扱説明書に記載されている電源・設置環境など、本製品の使用条件を逸脱した
周囲条件による場合
- ⑥火災・天災(地震・水害・落雷等)の場合

禁 忌 ・ 禁 止	
●分解・機器の改造。 ●未整備状態での使用。(未整備とは、点検・清掃を行っていない状態を言います) ●変形、変色の恐れのある有機溶剤及び薬液の吸引。	

2.安全及び危険防止の為の使用上の注意事項

1. 歯科従事者以外は機器を使用しないでください。

2.機器を設置する時は次の事項に注意してください。

- ①水のかからない場所に設置してください。
- ②気圧・温度・湿度・風通し・日光・埃・塩分・硫黄分を含んだ空気などにより、悪影響の生ずるおそれのない場所に設置してください。
- ③振動・衝撃（運送時を含む）など安定状態に注意してください。
- ④化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に設置しないでください。

3.機器の使用前は次の事項に注意してください。

- ①コードの接続が正確でかつ安全に接続されていることを確認してください。
- ②装置の電源は10A以上の容量があるコンセントから取ってください。
- ③水分を含んだ石ころ・粉塵などの吸い込みは厳禁です。紙パックが破れ、故障の原因となります。
- ④紙パックは、こまめに交換してください。粉塵が詰まった状態では紙パックの破れ、モーター・負荷の増大により、故障の原因となります。
- ⑤紙パックは必ず指定された2品目の東芝紙パックをご使用ください。
それ以外をご使用の場合、モーターの寿命が極端に短くなることがあります。

5.特長

- バキュームモーター、コントロール回路の変更により従来型に比べ、小型・低価格化を実現しました。
- 独自開発のACモーターは耐久性に優れ長寿命かつ、交換も容易に行えます。
- 粉塵の処理は手軽に交換できるディスポーザブルタイプの東芝製高性能紙バックフィルタを使用しているので、手間なく低コストに行えます。
- コントロール内蔵タイプで、吸引力の調整は本体のボリュームで行います。
机の上等でお使いいただける別売コントローラーもご用意しています。




※コードの長さ1.3m

6.セット内容

ご購入後、セット内容をご確認ください。

- ①本体×1 ②ホースバンド ③取扱説明書
 ジェットクリーナーⅡ・・・④吸引ホース(1.8m)
 ジェットクリーナーⅢ・・・④アーム ⑤クリアフード

7.各部名称

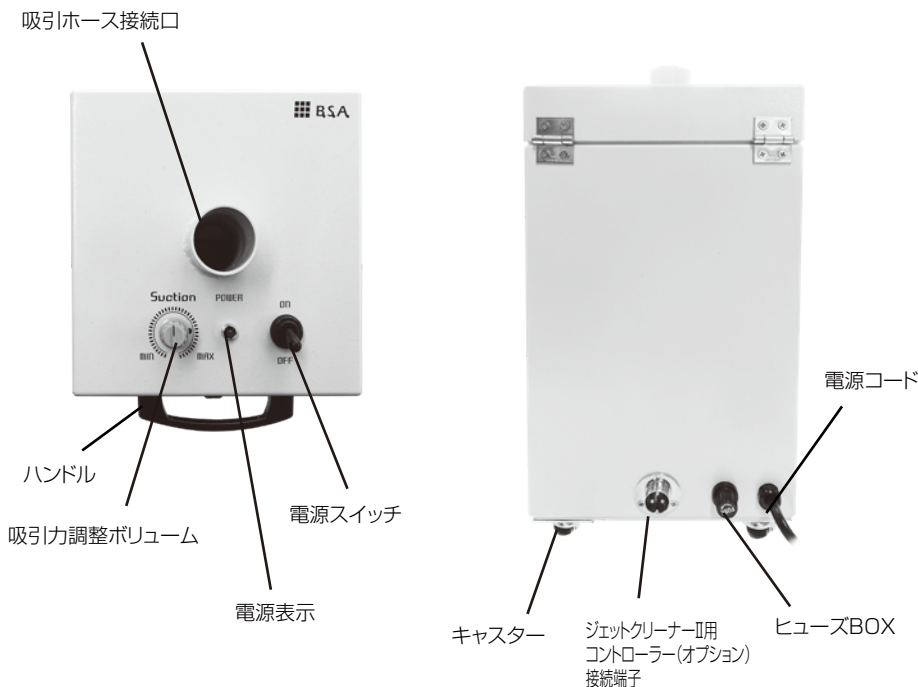

7.設置

紙パックのセット

- 1.正面のパッチン錠を外し、ハンドルを持ち、装置上部をゆっくり開けます。

2.中にある 紙パック固定金具を取り出し、図のように紙パックをスライドさせ、プレートの突起部分と、紙パックの穴を合わせ固定します。

3.紙パック固定金具に開いている2ヶ所のスリットと、本体にある位置合わせプレートに差し込みます。
※本体にある位置合わせプレートは左右どちら側で固定しても構いません。
- 紙パック固定金具

←紙パックをスライド

穴を合わせる

2ヶ所のスリット

本体位置合わせプレート
- 4.本体上部をゆっくりと元の位置に戻します。その際、吸引ホース接続口のパイプが紙パックのシールゴム内に入っていることを確認してからパッチン錠を閉じてください。

5.付属の吸引ホースを吸引ホース接続口に接続し、ホースバンドで固定します。

8.操作方法

- ①吸い込み口を所定の位置へ移動します。

②電源コードをコンセントに接続します。

③本体電源スイッチをONにします。

③本体にある吸引力調整ボリュームで適切な吸引力に調整します。なるべく必要最小限の吸引力に設定することにより、騒音及びモーターの寿命の点から有利となります。

④作業が終了したら、電源スイッチをOFFにし、電源を切ります。長時間使用しない場合は、ACプラグを抜いてください。

別売のジェットクリーナーⅡ・Ⅲ用コントローラーをご使用の場合…



コントローラーは、1.3mの操作コードが付いているので、本体から離れた場所で操作するのに便利です。

ご使用の際は、本体の電源スイッチはOFF・吸引力調整ダイヤルは最小の状態にして机上のコントローラーにてON/OFF並びに吸引力調整を行ってください。

注 意
●移動の際は操作パネルの電源スイッチをOFFにしてから行ってください。
●電源コードを差したまま移動させないでください。
●必ず本体ハンドルを持って移動してください。
●移動時は他の機器や患者様に接触しないように十分注意してください。

ご使用後は…

- 本体電源スイッチをOFFにし、電源プラグを必ず抜いてください。

●長時間ご使用した場合、本体内部が高温になる場合があります。

9.紙パックについて

紙パックは、東芝製 VPF-5・PF-7が使用可能です **その他の紙パック、フィルターなどを指定以外のものを使用した場合は、保証対象外です。**次の紙パック比較表を参考にして、用途により適切な紙パックをお選びください。


	VPF-5	VPF-7
タイプ		
素材	(表示なし)	銀イオン系繊維・(脱臭・抗菌)
構造	3層	3層
フィルター厚さ	—	VPF-5の約3倍
集塵力	中	高
吸引力持続性	中	高
排気性能	—	0.5μmの約99%除去
入数	5	3

※東芝紙パックの規格で2層構造の VPF-6 がありますが粉塵漏れ原因となる為、使用しないでください。

10.メンテナンス

■交換可能な消耗部品

●フィルター		標準価格	2,000円
●ヒューズ		標準価格	1個 200円
●東芝製紙パックフィルター VPF-5		標準価格	5枚 オープン価格
●東芝製紙パックフィルター VPF-7		標準価格	3枚 オープン価格
●ジェットクリーナーⅡ用技工用マウス		標準価格	8,000円

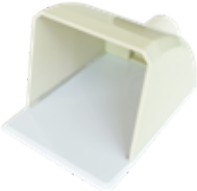

※注：ジェットクリーナーⅢにはご使用頂けません。

●ジェットクリーナーⅢ用交換用クリアフード



..... 標準価格 2,000円

●ジェットクリーナーⅢ用 クリアフード固定ネジ



※クリアフード 固定用ネジは別売りです。

..... 標準価格 300円

※注：ジェットクリーナーⅡにはご使用頂けません。

10.保証について

- 取扱説明書通りの正常なご使用のもと製品の不具合が生じた場合、保証書による1年間の機器無償修理を致します。

●消耗品(紙パック・フィルター)バキュームモーター及びフィルターは保証対象外です。

●故障した場合には、お買い求めの販売店様に修理をご依頼ください。

製造販売 住所 T E L 製造業者 製造国名	株式会社 ビーエスエーサクライ 名古屋市天白区高島1-117-1 052-805-1181 インターデンタル 韓国
-------------------------------------	---

本品は予告なしに機器のデザイン、仕様、付属品の内容を変更することがあります。

ご不明な点がございましたら
弊社宛お問合せください。