

ラレス パステルプラス 取扱説明書

2023.08.10



【使用前準備】

①購入後は使用前に洗浄し、オートクレーブ滅菌をかけてください。(132℃15分間)

■操作・・・

①歯科用ユニットの空気圧を、0.24～0.34Mpaの間に設定します。(推奨空気圧：0.28MPa/40Psi)

②本体後部にエアークネクタを接続します。

③使い捨てプロフィーアングルを本体先端の突起とアングルのスリットの向きを合わせ、
まっすぐカチッと音が鳴るまで奥までしっかりと差し込んでください。

④歯科用ユニットからエアを送り、回転させクリーニング又は研磨を行います。

⑤治療後は歯科用ユニットのエアを止めてください。

■使用後・・・

①使い捨てプロフィーアングルをまっすぐ引き抜いて取り外してください。

②本体からエアークネクタを取り外します。

③本体表面はをめるま湯(35～45℃)に浸け、見える汚れを柔らかいブラシで洗浄してください。

※洗浄の際は付属のキャップをしっかりと奥まで被せ、後部から水が入らないように注意してください。

本体内部は別売の洗浄潤滑スプレー「ウルトラケアスプレー」を使用し洗浄を行います。

※先端から排出されるオイルが汚れがなく透明になっていることを確認後、オートクレーブ滅菌を行ってください。ヘッドから黒いオイルが出ているうちにオートクレーブ滅菌を行いますと汚れがオートクレーブの熱により焼き付き、ベアリング故障の原因となります。

④タオルなどで乾燥後、滅菌バックに入れ、オートクレーブ滅菌してください。

※(132℃15分間)135℃を超えないようにしてください。

※オートクレーブ滅菌直後は熱くなっています。温度が下がってから作業してください。



パステルプラスの適正空気圧は、
0.28MPa/40Psi です。

ご使用前に必ずご確認ください。
高すぎるエア圧は
ベアリングの寿命を短くします。

パステルプラスは
「注油」
が不可欠です。

ハンドピースの使用には、日々のメンテナンスが必ず必要です。

※使用毎にこまめに充分注油をしてください。

■注油不足は軸ブレや発熱につながります

注油不足によりベアリングが摩耗・劣化すると、軸ブレや発熱等が発生します。

軸ブレや発熱等の回転異常は、けが・やけどの原因になり大変危険です。異常を感じたら直ちに使用を中止し、販売店へご連絡ください。

■注油頻度 のめやす



オートクレーブの「前後」

- ・オートクレーブ「前」の注油ハンドピース内の汚れを外部に流し出す「洗浄」が目的
- ・オートクレーブ「後」の注油滅菌中に蒸発した潤滑油をハンドピース内に浸透させる「注油」が目的

連続使用10分を超えたとき 高速回転させると有効な潤滑成分が気化し、ハンドピース内から流れ出てしまいます。
連続使用10分を目安に再度注油してください。

しばらく使用しなかったとき 潤滑油は自然蒸発します。1週間使用しなかった場合は、使用前に再度、注油してください。

■注油量のめやす 先端からオイルが出るまで **3～4秒**。注油後は **30秒**回転させ、余分なオイルを抜いてください。



洗浄潤滑スプレー
「ウルトラケアスプレー」
標準価格
1本 520ml 1,800円

【使用上の注意】

- ・歯科医療従事者以外は使用しないでください。
- ・感染防止のため、本品は滅菌したものを使用してください。
- ・使用前に各接続部にゆるみがないか確認してください。
- ・使用時に異常が発見された場合には機器の動作を直ちに止め、販売店又は弊社まで修理依頼をしてください。
- ・本器を使用する際は、保護メガネ、マスク、グローブを着用してください。
- ・許容範囲を超えた空気圧で、本器を使用しないでください。
- ・本器を洗浄液に浸さないでください。
- ・本器に塩素系消毒剤を使用しないでください。
- ・オートクレーブ滅菌直後は熱くなっているのでヤケドに注意してください。
- ・本器の分解・改造は行わないでください。
- ・本品の廃棄には、滅菌などの感染防止の処置後、各自治体の指示に従って廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

- ・水のかからない場所に保管してください。
- ・気圧、湿度、温度、風通し、日光、ホコリ、塩分・硫黄などを含んだ空気などにより悪影響の生じない場所に保管してください。

保管・輸送時の環境	温度	-23℃～60℃	相対湿度	0～90%	気圧	500～1200hPa
-----------	----	----------	------	-------	----	-------------

— 保証 —

●取扱説明書通りの正常なご使用のもと製品の不都合が生じた場合は、保証書による1年の機器無償修理を致します。ただし、以下の場合は保証対象外です。

1. 誤用および落下等、取扱い不注意、外的衝撃による故障、損傷。
2. 不当な修理または改造による故障、損傷
3. 火災、地震、水害、その他天災地変及び落雷などによる異常電圧による故障、損傷。
4. 消耗品(ベアリング)の破損。
5. 保証書の提示がない場合および保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記載のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

本品は予告なしに機器のデザイン、仕様、付属品に内容を変更することがあります。

ご不明な点がございましたら弊社またはご購入いただいた販売店までお問い合わせください。

輸入販売業者：(株)ビーエスエーサクライ TEL.052-805-1181

製造業者：LARES RESEARCH, Inc. ラレス リサーチ インク(アメリカ)